



LIIKERADAT

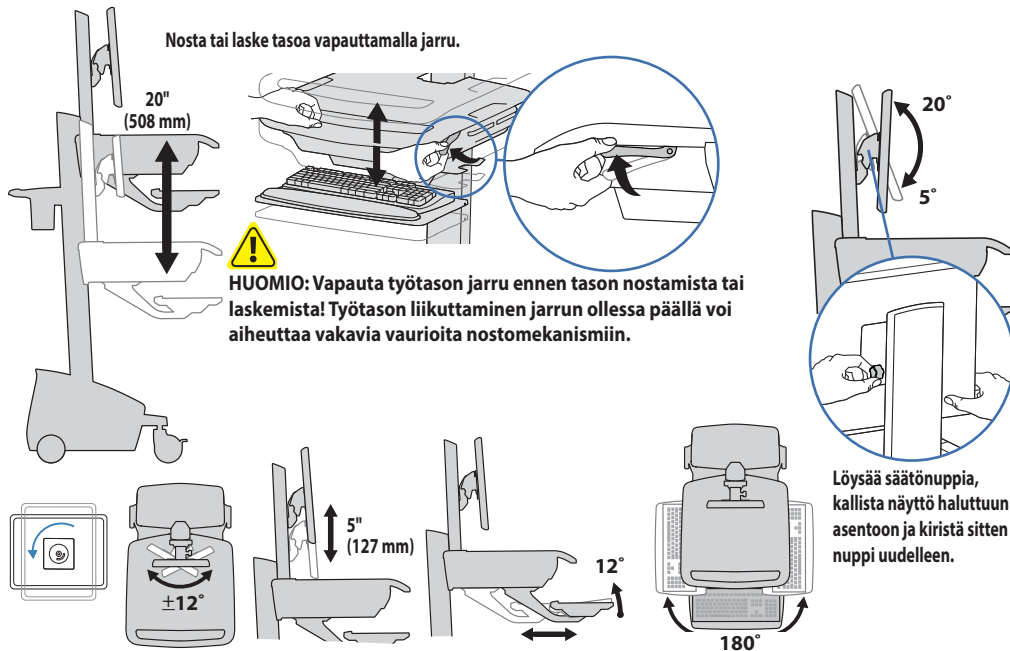

ERGONOMIA


Työskenneltäessä – säädä mittojesi mukaan

- 1 Säädä näyttö siten, että sen yläreuna on noin 2,5 cm silmien tason alapuolella – Vapauta jarru ja nosta tai laske tasoa tarpeen mukaan.
- 2 Kallista näyttöä käyttömukavuuden parantamiseksi sekä silmiin ja niskaan kohdistuvan rasituksen vähentämiseksi.
- 3 Vedä näppäimistöä esiin ja aseta hiiritaso ja -pussi näppäimistön vasemmalle tai oikealle puolelle.
- 4 Työskentele siten, että kyynärpäsi ovat noin 90° kulmassa; näin vähennät tehokkaimmin lihasrasitusta.
- 5 Jos tason nostaminen tai laskeminen on vaikeaa tai jos se ei pysy valitussa asennossa, katso sen kiristysten säätämistä koskevat ohjeet tuotteen käyttöoppaasta.
- 6 Pidä akku ladattuna!
Virtaliitännöillä varustetut vaunut tulisi liittää pistorasiaan aina, kun se on mahdollista, jotta akku pysyy latautuneena ja tietokone toiminnassa.

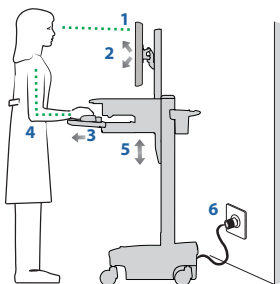

Liikuteltaessa – aseta kaikki osat ja laitteet turvallisesti paikoilleen

- 1 Kun vaunua liikutellaan normaalissa käytössä, vapauta jarru ja laske taso alimpaan asentoon; näin parannat vaunun vakautta ja varmistat esteettömän näkyvyyden eteenpäin.
- 2 Paina avoinna olleet tasot sisään ja aseta hiiri, lukija ja muut lisävarusteet takaisin paikoilleen.
- 3 Vapauta molempien etupyörien lukitukset.
- 4 Työnnä vaunua takaapäin siten, että kyynärpäsi ovat noin 90° kulmassa; näin parannat vaunun ohjattavuutta ja vähennät lihasrasitusta.
- 5 Muista irrottaa virtajohto!
Varmista ennen vaunun liikkuttamista, että sen virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja kiinnitetty turvallisesti korissa olevaan pidikkeeseen. Muista ladata akku täyteen joka päivä!

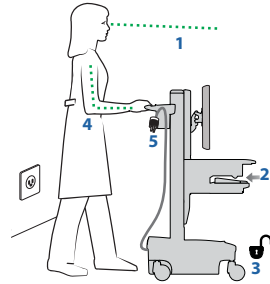





NÄPPÄIMISTÖN VALAISIN

Tietokoneen on oltava päällä, jotta valaisin toimii.

Näppäimistön valaisin sammuu automaattisesti 15 minuutin käytön jälkeen, jos sitä ei sammuteta manuaalisesti.

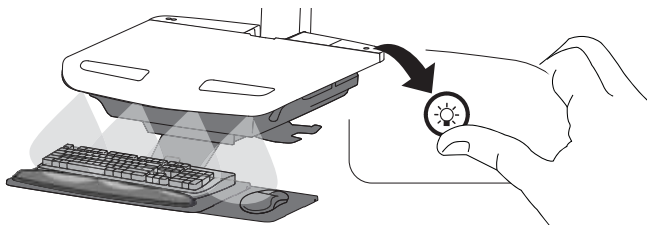

Virransyöttöjärjestelmän käyttöliittymä varoittaa sinua vaunun akun varaustilan vähenemisestä jatkuvasti palavien tai vilkkuvien punaisten, keltaisten tai vihreiden valojen avulla ja antaa lisäksi varoitusäänen, jos varaus laskee alle 10 %:n. Muista, että akku on ladattava täyteen päivittäin. Voit jatkaa vaunun käyttöä akun latautuessa, joten virtajohto kannattaa liittää pistorasiaan aina, kun mahdollista, jotta akku ei pääse tyhjenemään!
HUOMAUTUS: Voit pidentää akun varauksen kestoa asettamalla näytön virransäästötilaan.

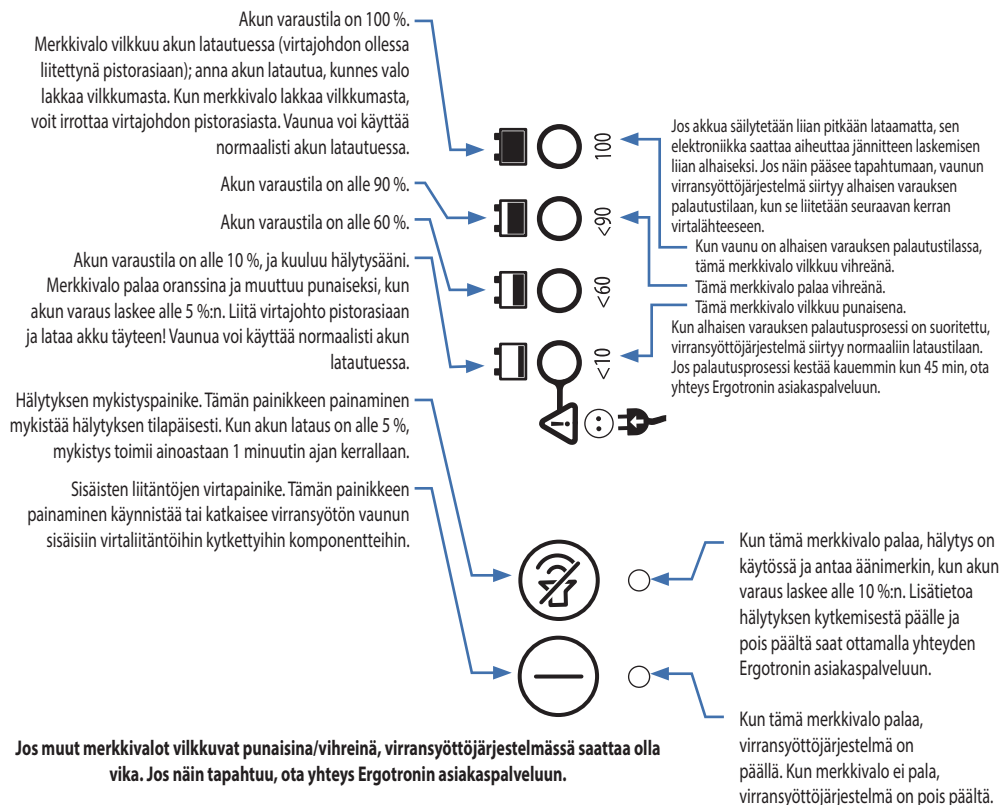

HUOMAUTUS: Vaunun toistuva käyttö akun varaustilan ollessa alle 10 % saattaa lyhentää akun käyttöikää.